



Usein kysyttyä

Kuinka kauan voin käyttää GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentakiskoani?

Voit käyttää samaa GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentakiskoa enintään kolmena yönä, riippuen hampaiden narskuttelun määrästä ja oireiden voimakkuudesta. Suosittelemme vaihtamaan purentakiskon uuteen, kun siinä näkyy huomattavaa kulumista. Ohjeiden mukaan sinun ei tulisi käyttää samaa purentakiskoa enempää kuin kolmena yönä. Älä käytä purentakiskoa uudestaan, jos se ei asetu hampaisiin hyvin.

Miten voin puhdistaa GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentakiskoni?

Puhdista GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentakiskosi kylmällä vedellä tai suuhuuhteella, jos käytät samaa purentakiskoa pidempään kuin yhden yön. Kuivaa purentakisko ja säilytä se mukana tulevassa pakkauksessa.

Kuinka kauan voin pitää GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentakiskoa suussa?

Älä käytä yli 12 tuntia yhtäjaksoisesti.

Tarvitseeko purentatukien ylettää takimmaisten poskihampaiden kohdalle, jotta kisko on toimiva ja istuva?

Ei – purentatukien ei tarvitse ylettää takimmaisten poskihampaiden kohdalle ollakseen toimivia. Purentatuet asetetaan yleensä toisen puolen takahampaisiin.

Täytyykö minun keittää, muotoilla tai leikata GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentakiskoa?

Ei – kisko on käyttövalmis eikä se vaadi keittämistä tai leikkaamista.



Tärkeää tietoa:

GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentakisko on suunniteltu parhaan mukavuuden saavuttamiseksi ensimmäisellä käyttökerralla. Ota huomioon, että tuotteen käyttöön tottuminen voi kestää viikosta kahteen viikkoon. Paras tulos oireiden hoitamisessa saavutetaan käyttämällä purentakiskoa säännöllisesti ensimmäisten viikkojen aikana.

GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentakiskoa on helppoa ja turvallista käyttää koko yön. Jos purentakiskon käyttö aiheuttaa kipua, lopeta kiskon käyttö välittömästi ja konsultoi hoitavaa hammaslääkäriäsi käytön jatkamisesta. Purentakiskon käyttöön tottuminen voi kestää ainakin viikon.

Tuote ei sisällä lateksia tai silikonista. BPA-vapaa tuote.

Varoitus

Lopeta GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentakiskon käyttö, jos se ei istu hyvin, irtoaa helposti, vaikeuttaa hengittämistä tai nielemistä, aktivoi oksennusrefleksin, muuttaa purentaa, aiheuttaa verenvuotoa, kipua leukaluussa, hampaissa tai korvissa tai jos sinulla on leuan naksumista. Jos käytät GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentakiskoa pidempään kuin yhden yön, tarkista päivittäin purentakiskon pintojen kulumisen. Lopeta käyttö ja heitä purentakisko pois, jos siinä on repeytymiä, reikiä, puuttuvia osia, materiaali on erikoisen väristä tai jos siinä on muuta vauriota.

ÄLÄ KÄYTÄ

- Jos olet alle 18-vuotias.
- Jos sinulla on oikomiskoje tai proteettinen rakenne suussa.
- Jos sinulla on liikkuvia hampaita.
- Jos sinulla on diagnosoitu Temporo-Mandibulaarinen (TMD) leukanivelvaiva tai muita purentaelimistön sairauksia.
- Jos sinulla on purentasuoja aiheuttavaa kipua leukaluussa.
- Purentasuojaa hammasuojana urheilussa, koska se ei vaimenna osumia hampaisiin.
- Alussa ilman hammaslääkärin konsultaatiota yli kolmea kuukautta. Konsultoi hammaslääkäriäsi kuuden kuukauden välein, kun olet saanut luvan käyttää tuotetta.

Kysy lisätietoja hammaslääkäriltäsi, jos sinulla on:

- Irrallisia kruunuja, paikkoja tai hoitamattomia reikiä.
- Leukanivelääniä.
- Kipua hampaissa, leuassa, kasvoissa tai jos sinulla on vaikeuksia purra hampaita yhteen.
- Kaksi tai useampaa puuttuvaa hammasta.
- Limakalvomutoksia tai haavaumia suussa.
- lensairauksia tai spontaania ienverenvuotoa.
- Vaikeita hengitys-, sydän- tai muita yleissairauksia.



Tärkeää tietoa:

Lopeta käyttö ja konsultoi hammaslääkärää, jos:

- Narskuttelun oireet jatkuvat muutaman viikon käytön jälkeen.
- Parentakisko putoaa suustasi helposti.
- Parentakisko tuntuu epämukavalta ja aiheuttaa oksennusrefleksin aktivoitumisen.
- Ikenet tuntuvat kipeiltä, vuotavat verta tai sinulla on muita limakalvomuutoksia suussa.
- Huomaat uusia oireita, kuten kipua leuoissa, hampaissa, korvissa tai kaulassa. Sinulla on päänsärkyä tai leukanivelten naksumista käytön jälkeen.

GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -parentakisko ei ole tarkoitettu suu- ja leukasairauksien diagnoosia tai sairauksien parantamista varten. Parentakisko ei ole suunniteltu vaikuttamaan leukojen rakenteeseen tai toimintaan.

Ainutlaatuinen suoja yöllisen narskuttelun hoitoon

Ranir SAS, 36, avenue Salvador Allende,
Bât. I N° 49-50, 60000 Beauvais, France.

Eränumero löytyy laatikon pohjasta.

Lue ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Valmistettu Kiinassa

Plackers GRIND-NO-MORE

Dental Night Protector

Mukava-Suojaava-Hygieeninen

Individually packaged and ready to use = Yksittäispakattu ja käyttövalmis.



Onnittelut!

Olet juuri ostanut edistyksellisen GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentakiskon, joka suojaa sinua yöllisen bruksismin (= hampaiden narskuttelun ja yhteenpuremisen) aiheuttamilta hampaiden kovakudosvaurioilta.

GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentasuojaja tarjoaa ennenkokematonta mukavuutta, suojaa ja hygieenisyyttä. Tyylikkäästi muotoiltua ja kaikille sopivaa GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentasuojajaa voi ainutlaatuisen muotoilun vuoksi käyttää joko ylä- tai alaleuassa – oman mieltymyksesi mukaan. Jokaista GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentasuojajaa voi käyttää jopa kolme yötä – se säilyttää tehonsa ja pysyy puhtaana.



HAMPAILLE.FI
Suun hyvinvoinnin puolesta

Upper teeth = Ylähampaat

Lower teeth = Alahampaat

GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentasuojajaa voi ainutlaatuisen muotoilun ansiosta käyttää joko ylä- tai alahampaissa.



Grind No More -purentakiskon saat osoitteesta www.hampaille.fi.




Avaaminen ja säilytys

Avaa yksittäispakattu GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentakiskon pakkaus varovaisesti vetämällä foliokantta auki, kuvan ohjeiden mukaan. Jos tulet käyttämään purentakiskoa useampana yönä, älä irrota foliokantta kokonaan pakkauksesta. Sulje foliokansi, kun haluat säilyttää purentakiskoa pakkauksessa.

Avaa foliokansi, mutta älä irrota kokonaan.

Aina puhdas ja raikas.

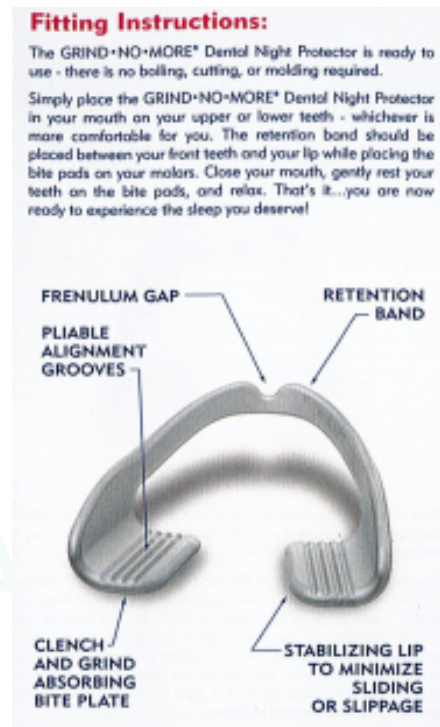

Asetusohjeet

Plackers GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentasuojia on käyttövalmis – ei vaadi keittämistä, leikkaamista tai muotoilemista.

Aseta GRIND-NO-MORE® Dental Night Protector -purentasuojia suuhun joko ylä- tai alahampaisiin sen mukaan, mikä tuntuu sinusta parhaimmalta. Aseta etualueen tukikaari etuhampaiden ja huulen väliin, samalla kun asetat purentasiivekkeet poskihampaiden väliin. Pure hampaitasi yhteen hellästi niin, että takahampaat lepäävät purentasiivekkeillä ja rentoudu. Siinä kaikki... Olet nyt valmis nauttimaan huolettomista yönistä ilman narskuttelua!