


OPADESCENE GO 6% YKSITYISKOHTAISET KÄYTTÖOHJEET

VAIHE 1




Ota lusikka pakkauksesta.

VAIHE 2

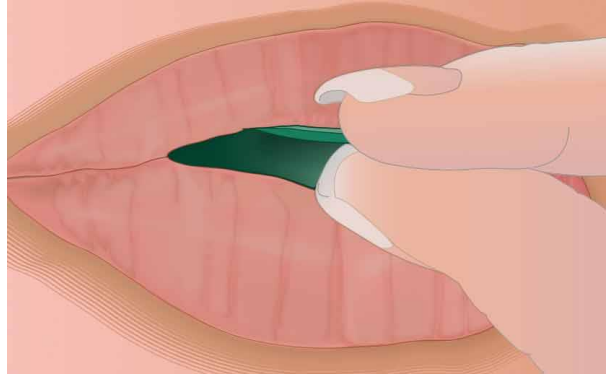


Keskitä lusikka hammaskaarelle.

VAIHE 3

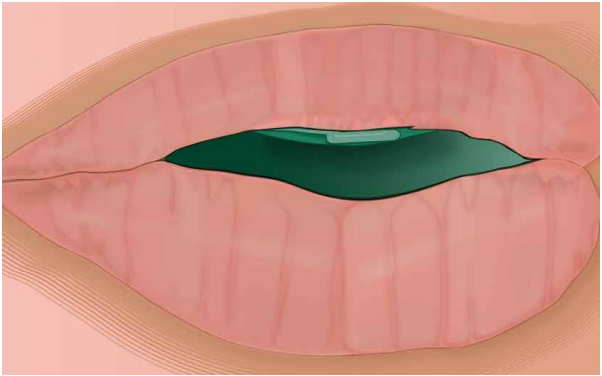


Tee varovainen imaiseva liike tai nielaisu uudelleen.

VAIHE 4

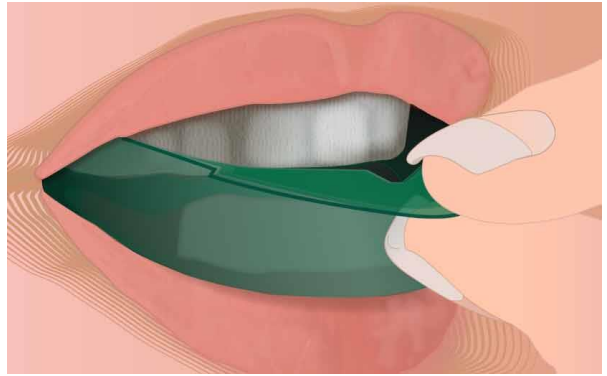


Poista venttilusikka.

VAIHE 5

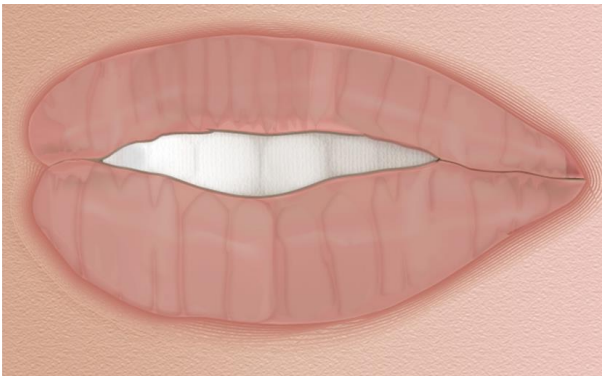

Tee uudelleen varovainen imaiseva liike tai nielaise uudelleen.

VAIHE 6

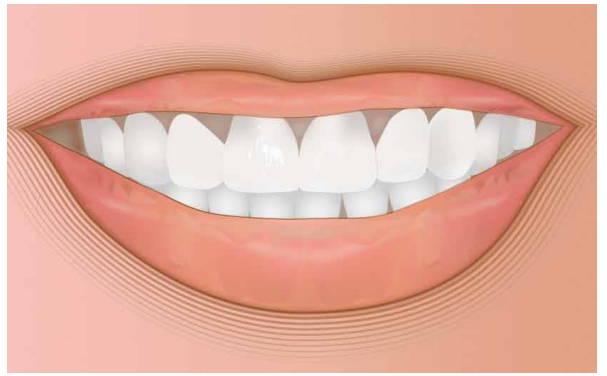

Pidä 6%:n lusikkaa suussa 60-90 minuuttia.

